

BONNEHEURE®

GEL Z MEDICINSKIM REKOMBINANTNIM HUMANIM KOLAGENOM NAVODILA ZA UPORABO

[Ime izdelka]: Gel z medicinskim rekombinantnim humanim kolagenom

[Model/Specifikacija]: 5 g/steklenička, 20 g/steklenička, 30 g/steklenička, 50 g/steklenička, 80 g/steklenička, 100 g/steklenička

[Glavne sestavine]: Izdelek je sestavljen iz rekombinantnega humanega kolagena tipa III, ksantana gumija, glicerina, metilparabena, fenoksietanola in vode.

[Namen uporabe]: Primeren za nego ran, ki niso kronične in okoliške kože. Izdelek se uporablja izključno kot mehanska zaščita.

[Lastnosti delovanja]: Izdelek mora biti brezbarven, viskozen gel, brez vidnih tujkov ali nečistoč. Steklени vsebnik mora biti brez madežev. Vrat vsebnika ne sme puščati tekočine in ne sme imeti zarez, ostrih robov ali drugih napak.

[Kontraindikacije]: Izdelka ne smejo uporabljati osebe, alergične na beljakovinske izdelke. Previdnost je potrebna pri nosečnicah in doječih materah.

[Navodila za uporabo]: Samo za zunanjo uporabo. Po čiščenju kože nanesite gel na prizadeto mesto. Uporabljajte dvakrat dnevno ali po navodilu zdravnika, dva tedna zapored. Izogibajte se uporabi v predelu oči, na sluznicah, genitalnem področju ter peroralni uporabi. Priporočamo samostojno uporabo izdelka. Če je potrebna kombinirana uporaba, se predhodno posvetujte z zdravnikom.

[Opozorila]: Izdelka ne uporabljajte, če: a) je pretekel rok uporabe, b) je embalaža poškodovana. Izdelek je namenjen izključno za zunanjo uporabo na koži. Ni primeren za peroralno uporabo. Če med uporabo pride do pekočega občutka, rdečine ali otekline, takoj prenehajte z uporabo, kožo očistite in se po potrebi posvetujte z zdravnikom. Hranite izven dosega otrok. Bele, mlečno bele ali rahlo rumenkaste nianse izdelka so običajne in ne vplivajo na njegovo učinkovitost. Izdelek je namenjen dopolnilni (podporni) negi kože in ran, ki ne zahtevajo aseptičnih postopkov.

[Varnostni ukrepi]:

Pred uporabo natančno preberite navodila ali uporabljajte izdelek po navodilu zdravstvenega strokovnjaka.








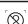
[Pakiranje]: Izdelek je pakiran v steklenih vsebnikih; 1 kos v škatli.

[Skладиščenje in transport]: Izdelek shranjujte pri sobni temperaturi. Zamrzovanje in odmrzovanje ne vplivata na uporabnost izdelka.

[Datum proizvodnje]: Navedeno na embalaži.

[Rok uporabe]: Dve leti

	CE oznaka
	Medicinski pripomoček
	Kataloška številka
	Številka serije
	Uporabno do
	Ne-sterilno
	Hraniti stran od sončne svetlobe
	Hraniti na suhem

	Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana
	Glejte navodila za uporabo
	Pozor!
	Proizvajalec
	Datum proizvodnje
	Pooblaščen zastopnik v Evropski skupnosti
	Enotna identifikacijska oznaka pripomočka (UDI)
	Za enkratno uporabo

[Proizvajalec]: Shandong D-Nutrimec Biomedical Co., Ltd

[Naslov proizvodnje]: 218 metrov vzhodno od križišča ulic Qingnian Road in Dingdang Road, ulica Tianzhong, okrožje Dingtao, mesto Heze, provinca Shandong, Kitajska, 274100

[Tel.]: +0086-530-6277775 **[E-pošta]:** edward@dnutrimec.com

EC REP

Naziv: Humiss Beratung GmbH

Naslov: Gneisenaustraße 8, 40477 Düsseldorf, Nemčija

[Uvoznik]: Wealth is Health d.o.o., Jezeri l dio, Jezero 36, 47304 Plaški, Hrvaška

[E-pošta]: franko@bonneheure.hr **[Tel.]:** +385-91-605-1391

[SRN]: DE-AR-000023447

Izdelano na Kitajskem

[Datum priprave navodil]: 1. junij 2025 **Revizija:** A/1

[Distributer]: Grandevita d.o.o., Zlatek 15, 1000 Ljubljana, Slovenija