

**BONNEHEURE®**

## OBLIŽ Z MEDICINSKIM REKOMBINANTNIM HUMANIM KOLAGENOM NAVODILA ZA UPORABO

**[Ime izdelka]:** Oblíž z medicinskim rekombinantnim humanim kolagenom

**[Model]:** Okrogel

**[Specifikacija]:** 25 g/oblíž, 5 oblížev/skatla

**[Glavne sestavine]:** Izdelek je sestavljen iz rekombinantnega humanega kolagena tipa III, karbomerja, hidroksietil celuloze, glicerina, natrijevega metilparabena, natrijevega propilparabena, fenoksietanola, vode za injekcije ter netkane tkanine. Izdelek ni steriliziran.

**[Namen uporabe]:** Primerno za enkratno uporabo pri negi ran, ki niso kronične in okoliške kože.

**[Lastnosti delovanja]:** Izdelek mora biti bel ali rahlo rumenkast vlažen film, brez neprijetnega vonja ter vidnih madežev ali nečistoč. Mora vzdržati obremenitev 500 g vsaj 3 minute brez pretrganja.

**[Kontraindikacije]:** Izdelka ne smejo uporabljati osebe, alergične na beljakovinske izdelke. Previdnost je potrebna pri nosečnicah in doječih materah.

**[Navodila za uporabo]:** Samo za zunanjo uporabo. Po čiščenju kože namestite oblíž na predvideno mesto. Odprite embalažo, razprite oblíž in ga namestite na kožo. Uporabite enkrat dnevno ali po navodilu zdravnika, dva tedna zapored. Izogibajte se uporabi v predelu oči, na sluznicah, genitalnem področju ter peroralni uporabi. Priporočamo samostojno uporabo izdelka. Če je potrebna kombinirana uporaba, se predhodno posvetujte z zdravnikom.

**[Opozorila]:** Izdelka ne uporabljajte, če: a) je pretekel rok uporabe, b) je embalaža poškodovana. Izdelek je namenjen izključno za zunanjo uporabo na koži. Ni primeren za peroralno uporabo. Če med uporabo pride do pekočega občutka, rdečine ali otekline, takoj prenehajte z uporabo, kožo očistite in se po potrebi posvetujte z zdravnikom. Bele, mlečno bele ali rahlo rumenkaste nianse izdelka so običajne in ne vplivajo na njegovo učinkovitost. Izdelek je namenjen dopolnilni (podporni) negi kože in ran, ki ne zahtevajo aseptičnih postopkov.








**[Varnostni ukrepi]:** Pred uporabo natančno preberite navodila ali uporabljajte izdelek po navodilu zdravstvenega strokovnjaka.






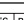

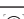
**[Pakiranje]:** Izdelek je pakiran v aluminijasti vrečki; 5 oblížev na skatlo.

**[Skladiščenje in transport]:** Izdelek shranjujte pri sobni temperaturi. Zamrzovanje in odmrzovanje ne vplivata na uporabnost izdelka.

**[Datum proizvodnje]:** Označeno na embalaži.

**[Rok uporabe]:** Dve leti.

	CE oznaka
	Medicinski pripomoček
	Kataloška številka
	Številka serije
	Uporabno do
	Ne-sterilno
	Hraniti stran od sončne svetlobe
	Hraniti na suhem

	Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana
	Glejte navodila za uporabo
	Pozor!
	Proizvajalec
	Datum proizvodnje
	Pooblaščen zastopnik v Evropski skupnosti
	Enotna identifikacijska oznaka pripomočka (UDI)
	Za enkratno uporabo

**[Proizvajalec]:** Shandong D-Nutrimec Biomedical Co., Ltd

**[Naslov proizvodnje]:** 218 metrov vzhodno od križišča ulic Dingnian Road in Dingdang Road, ulica Tianzhong, okrožje Dingtao, mesto Heze, provinca Shandong, Kitajska, 274100

**[Tel.]:** +0086-530-6277775 **[E-pošta]:** edward@dnutrimec.com



**Naziv:** Humiss Beratung GmbH

**Naslov:** Gneisenaustraße 8, 40477 Düsseldorf, Nemčija

**[Uvoznik]:** Wealth is Health d.o.o., Jezeri I dio, Jezero 36, 47304 Plaški, Hrvaška

**[E-pošta]:** franko@bonneheure.hr **[Tel.]:** +385-91-605-1391

**[SRN]:** DE-AR-000023447

**Izdelano na Kitajskem**

**[Datum priprave navodil]:** 1. junij 2025 **Revizija:** A/1

**[Distributer]:** Grandevita d.o.o., Zlatek 15, 1000 Ljubljana, Slovenija